

Anleitung: Befüllung Vliestuchspender

Zur Verwendung mit gebrauchsfertigen oder nach Herstellerangaben angesetzten Desinfektionsmitteln.


Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

①



Deckel des Vliestuchspenders entfernen und mit der Außenseite auf der Arbeitsfläche ablegen.

②

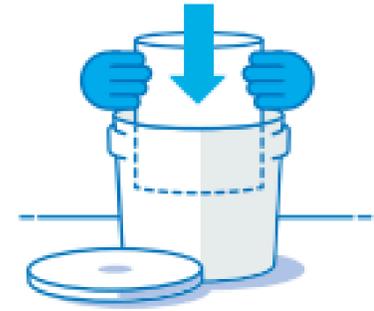

Trockene Vliestuchrolle aus der Verpackung nehmen und in den Spender einsetzen.
Alternative: Bereits vorgetränkte Tücher mit dem Beutel einsetzen und mit Schritt 4 fortfahren.

③




Desinfektionsmittellösung langsam und spiralförmig über die Vliestuchrolle in den Spender füllen.

Dosieranleitung


Blatt/Rolle	50	70	100	120
Lösung	1,5 L	1,5 L	3,0 L	2,5 L

④

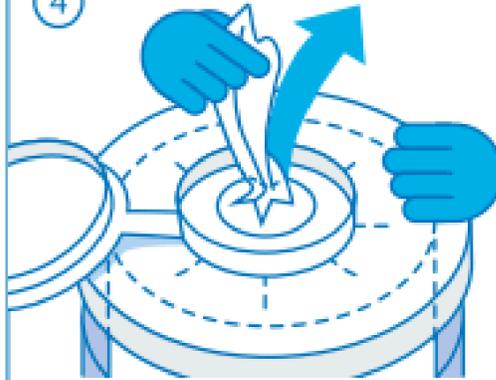

Erstes Vliestuch aus der Mitte der Tuchrolle herausziehen und den vorderen Teil des Tuches durch das sternförmige Entnahmesystem führen.

⑤

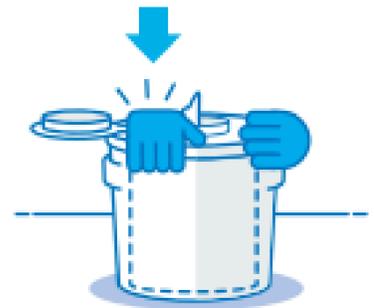


Vliestuchspender fest verschließen.

⑥



Beim Schließen der Entnahmeöffnung darauf achten, dass das herausgezogene Tuch vollständig vom Schutzdeckel umschlossen ist.

⑦

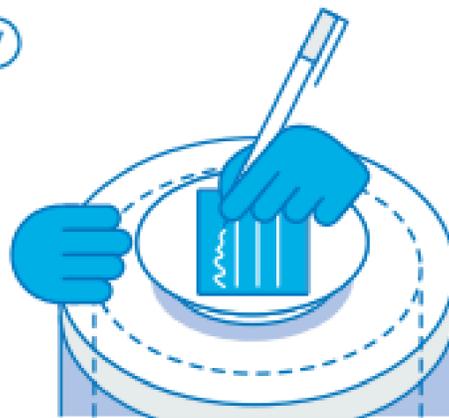

Beigefügtes Deckeletikett mit den Ansatzinformationen vollständig ausfüllen und auf dem Deckel anbringen.

⑧



Nach 30 Minuten sind die Tücher einsatzbereit. Das erste Tuch verwerfen. Nach jedem Gebrauch Spender wieder verschließen.